

Musik som spelas vid rörelse

Men det gäller att hålla igång. Annars slutar musiken att spela!

Busenkel! Så här gör du:



Häng Joyvest över axlarna

Känner du hur den omfamnar som en kram?



Fäst rörelsesensornerna på ex. ärm eller byxben.

Det är när dessa är i rörelse som musik spelas.



Tryck på någon av knapparna för att starta



Byt låt genom att klicka på

knappen med symbolen



Ändra volymen genom att

klicka en gång. Håll inne för tyst läge.

joyvest

Tips och Trix

Joyvest i olika situationer

OMSORG

Undersköterska eller demenssjuusköterska?

Joyvest kan användas som en åtgärd inom BPSD-registret. Är även till stor hjälp vid ex. förflyttningar.

HSL

Fysioterapeut eller Arbetsterapeut?

Använd Joyvest utifrån ett rehabperspektiv.

Balans-/gångträning eller annan ordinerad rörelse..

AKTIVITET

Aktivitetsansvarig eller aktivitetsombud?

Använd Joyvest spontant eller inplanerat. Testa att byta ut sista låten på sittgympan mot Joyvest.

Använd som en gruppaktivitet efter fikastunden

ANHÖRIG

Erbjud Joyvest när den boende får besök.

Skapa en meningsfull stund och möts genom musiken. Uppskattat även för barnbarnen!